

AProof®

CORONAVIRUS IMPFSTATUS

Adversis Pharma
Your companion in innovative diagnostics

PZN: 5452511
EAN: 4260706840034

Mit dem **AProof®** Coronavirus Impfstatus **DUO** Test von Adversis Pharma erhalten Sie ein Set zur eigenständigen Probenentnahme. Unser DUO-Test beinhaltet sowohl die Bestimmung des Impftiters **nach Impfung** gegen COVID-19 sowie die Laboranalyse auf IgG-Antikörper **nach einer Infektion** mit SARS-CoV-2.

Der **AProof®** Coronavirus Impfstatus **DUO** Test dient als Hinweis auf eine wirksam durchgeführte Impfung sowie auf eine überstandene Infektion und ist **NICHT** zur Prüfung auf eine akute Infektion geeignet. Das Ergebnis ist nach Registrierung auf unserer Webseite aproof.de online abrufbar und kann ausgedruckt werden.



ABLAUF

1) Kauf

Testset in der Apotheke kaufen. Die Analysekosten sind mit dem Kaufpreis bezahlt.

2) Probennahme

Mit beiliegender Lanzette Blutprobe aus der Fingerkuppe entnehmen und mindestens zwei Felder der Filterpapierkarte vollständig betropfen.

3) Versand

Abrufkarte behalten und Filterkarte im Rücksendeumschlag (kostenfrei innerhalb Deutschlands) einsenden.

4) Aktivierung


Kundenkonto auf www.aproof.de erstellen und Antikörpertest mit persönlicher Test-ID registrieren.

5) Ergebnis

Die Auswertung erfolgt im Regelfall innerhalb von 12 h nach dem Probeneingang im Labor. Status und Ergebnis können unter www.aproof.de abgerufen werden.

INHALT

- 2× automatische Lanzette
- 1× Filterpapierkarte
- 1× Abrufkarte
- 1× Desinfektionstuch
- 2× Wundpflaster
- 1× Tupfer
- 1× Papiertüte und
- 1× Rücksendeumschlag

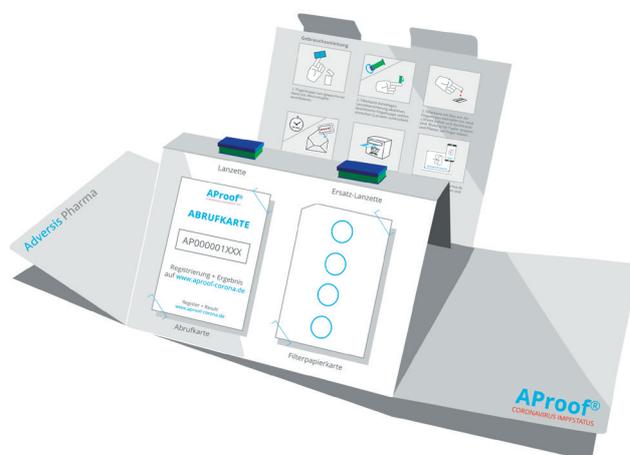

AProof® Probenahme-Set für die Laboranalyse mit allen notwendigen Dokumenten und Materialien zur Probenahme

DAS TESTSET

Im **AProof**[®] Probenahme-Set sind alle Komponenten enthalten, die Sie brauchen, um sich eine Blutprobe aus der Fingerkuppe zu entnehmen und kostenfrei an das eigene **AProof**[®]-Labor zurückzusenden. Die eingesandte Filterkarte mit der Blutprobe wird dort auf Impf-Antikörper gegen das SARS-CoV-2 Coronavirus getestet.


VORTEILE APROOF[®]

- Probenahme zu jeder Zeit selbständig Zuhause
- Geringste Blutmengen genügen, Filterpapierkarte statt Blutröhrchen
- Hohe Zuverlässigkeit des Tests – vergleichbar mit der Probenahme beim Arzt
- Analyse im eigenen Labor
- Ärztlicher Befund durch Fachärzte
- Ergebnis innerhalb von 12-24 Stunden nach Probeneingang abrufbar
- Ergebnisabruf online zu jeder Zeit
- Servicehotline für Beratung und Fragen


WARUM MIT IMPFSTATUS DUO TESTEN?

- Überprüfen der Wirksamkeit des Impfschutzes nach 2. Impfung
- Unterscheidung zwischen Impf-Antikörpern und Infektions-Antikörpern
- Separate Darstellung beider Antikörper-Ergebnisse auf kombiniertem Arztbefund
- Geringeres Risiko einer Ansteckung
- Mehr Sicherheit im Umgang mit Familie, Freunden und Kollegen


ANWENDUNG UND GEBRAUCH

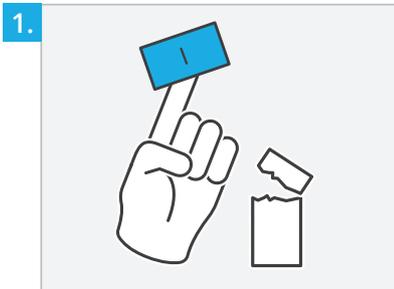


Fingerkuppe von gewaschener Hand mit Alkoholtupfer desinfizieren.

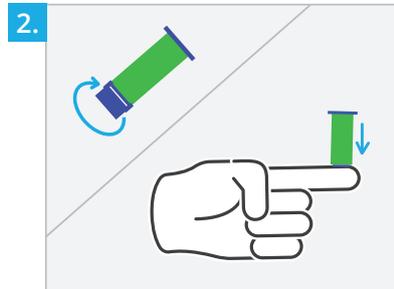


Filterkarte bereitlegen, Lanzettensicherung abdrehen, desinfizierte Fingerkuppe seitlich anstechen (Lanzette aufdrücken).

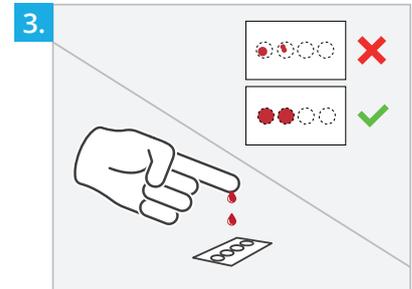

Filterkarte mit Blut aus der Fingerkuppe betropfen, bis **mind. 2 Kreise befüllt und durchtränkt** sind. Blutung mit Tupfer stoppen und Pflaster auf Finger kleben.

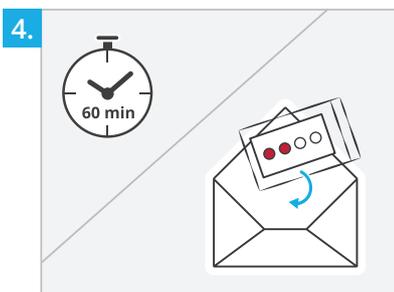

Filterkarte für **mindestens 60 Minuten** trocknen lassen, dann zuerst in die Papiertüte und anschließend in den beiliegenden Rückumschlag packen.

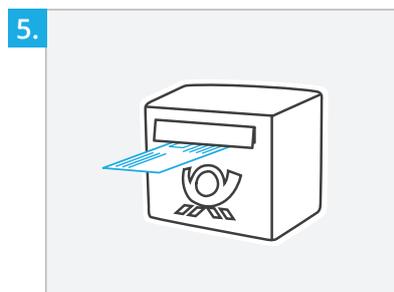

Absender auf Rückumschlag ausfüllen und in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. Versand innerhalb Deutschlands portofrei.



Unter www.aproof.de mit Abrufkarte registrieren und Ergebnis ca. 12-24 Stunden nach Laboreingang abrufen.