



AProof®

Coronavirus Impfstatus-Test

PZN 5452451

Mit dem AProof® Coronavirus Impfstatus-Test erhalten Sie ein Set zur eigenständigen Probenentnahme für die Bestimmung des Impftiters nach Impfung gegen COVID-19. Der Test analysiert Ihr Blut auf IgG-Antikörper gegen das S-Protein, welche im Falle einer erfolgreichen Impfung mit einem zugelassenen Impfstoff gebildet werden. Sie erhalten ein Set zur eigenständigen Probenentnahme aus der Fingerkuppe Zuhause und Einsendung in unser Fachlabor, wo die Analyse auf IgG-Antikörper gegen das S-Protein per zertifiziertem ELISA Verfahren durchgeführt wird. Das quantitative Ergebnis ist nach Registrierung auf unserer Webseite online abrufbar und kann ausgedruckt werden.

Ablauf

Kauf

Probenahme-Set in der Apotheke kaufen. Die Analysekosten sind mit dem Kaufpreis bezahlt.

Probennahme

Mit beiliegender Lanzette Blutprobe aus der Fingerkuppe entnehmen und mindestens zwei Felder der Filterpapierkarte vollständig betropfen.

Versand

Abrufkarte behalten und Filterkarte im Rücksendeumschlag (kostenfrei innerhalb Deutschlands) einsenden.

Aktivierung

Auf www.aproof.de registrieren, Fragen beantworten und Antikörpertest mit Code der Abrufkarte freischalten.

Ergebnis

Die Auswertung erfolgt in der Regel 12 h nach Probeneingang im Labor. Status und Ergebnis können unter www.aproof.de abgerufen werden.

Inhalt Probennahme-Set:

2x automatische Lanzetten, Filterpapierkarte, Abrufkarte, Desinfektionstuch, Pflaster, Papiertüte und Rücksendeumschlag